

Meclon IDRA

Dispositivo medico emulgel coadiuvante nel trattamento dell'atrofia vaginale per alleviare secchezza, prurito e bruciore.

La mucosa vaginale può risultare alterata e disidratata in alcune fasi della vita (età fertile, puerperio e menopausa), in caso di condizioni patologiche (vaginiti atrofiche, carenza di estrogeni, distroidismi), di terapie farmacologiche croniche (terapie ormonali, antidepressivi) o uso di contraccettivi ormonali. Tali situazioni sono spesso associate a sintomi fastidiosi come bruciore, irritazione, dolore spontaneo o provocato da rapporti sessuali ecc. Se non correttamente gestite, queste tendono a peggiorare innescando uno stato infiammatorio, creando microlesioni dell'epitelio vaginale o piccoli sanguinamenti e/o favorendo l'insorgenza di vaginiti.

Che cos'è MECLON IDRA e a cosa serve

MECLON IDRA è un dispositivo medico in forma di emulgel, per applicazione vaginale, utile a favorire l'idratazione della mucosa atrofica o assottigliata riducendo i sintomi correlati come secchezza, prurito, bruciore e irritazione.

In particolare la sua formulazione presenta:

ACIDO IALURONICO: grazie alla sua capacità di inglobare le molecole d'acqua, mantiene idratata la mucosa vaginale con cui è in contatto;

OLIVELLO SPINOSO: grazie alle sue molteplici proprietà, in particolare per l'effetto lenitivo, riduce l'irritazione tissutale.

ALOE VERA: con effetto lenitivo contro prurito e bruciore. Grazie all'elevato contenuto di polisaccaridi, che formano una pellicola elastica, favorisce il mantenimento della fisiologica idratazione della mucosa, riducendone la perdita di acqua.

Grazie all'azione sinergica dei suoi componenti funzionali, MECLON IDRA:

- Idrata la mucosa riducendo la secchezza vaginale;
- Protegge il tessuto vaginale alleviando i sintomi fastidiosi come prurito e bruciore;
- Lenisce l'irritazione e lo stato infiammatorio della mucosa vaginale;
- Non altera il pH vaginale.

Quando utilizzare MECLON IDRA

L'utilizzo di MECLON IDRA è consigliato in caso di atrofia e secchezza vaginale di diversa origine (menopausa, farmaci, squilibri ormonali, stress).

MECLON IDRA può essere utilizzato anche per applicazione esterna.

Si consiglia di non utilizzare contemporaneamente ad altri trattamenti ginecologici ad applicazione topica, senza aver prima consultato il medico.

Avvertenze prima di prendere MECLON IDRA


Il prodotto è da intendersi esclusivamente per uso vaginale, non utilizzare per una via di somministrazione differente da quella indicata nel presente foglietto illustrativo. Non utilizzare in donne in gravidanza senza aver prima consultato un medico. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. Non utilizzare il tubetto se risulta rotto o danneggiato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Come utilizzare MECLON IDRA (istruzioni per l'uso e posologia)

Istruzioni per l'uso

MECLON IDRA è confezionato in pratici ed igienici monodose che lo rendono facile da usare per l'applicazione intra-vaginale.

Per un utilizzo del prodotto sicuro e corretto, lavare accuratamente le mani prima dell'applicazione. Rimuovere il tappo dall'estremità del monodose. Sedersi o sdraiarsi, inserire delicatamente l'estremità del tubetto in vagina, premere delicatamente in modo da consentire la fuoriuscita del contenuto direttamente in vagina. Rimuovere il monodose.

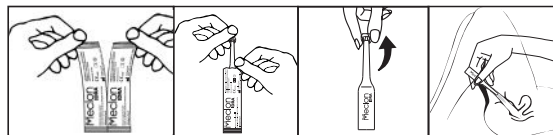

Non riutilizzare; ogni tubetto è monouso e contiene la quantità di prodotto necessaria per una singola dose/applicazione. Il riutilizzo del prodotto non è stato testato.

Si consiglia di usare MECLON IDRA di sera, al momento di coricarsi e dopo la quotidiana igiene intima. Si potrebbero verificare piccole perdite di prodotto che, però, non compromettono l'efficacia del trattamento. Il prodotto non unge e non macchia i tessuti.

Posologia

Utilizzare un tubetto al giorno per un periodo di 2 settimane. Durante la fase di mantenimento è consigliabile ripetere l'applicazione 2 volte alla settimana per un periodo di almeno due mesi. Per periodi più lunghi, consultare il proprio medico. Se i sintomi permangono, se compare irritazione e/o dolore, se si verificano delle perdite di sangue sospendere il trattamento e contattare il medico.

MECLON IDRA è compatibile con l'uso di profilattici in lattice e non riduce la loro efficacia contraccettiva e protettiva dalle malattie sessualmente trasmissibili.

Come conservare MECLON IDRA

Conservare in luogo fresco ed asciutto e al riparo dalla luce diretta, ad una temperatura non superiore a 25 °C.

Composizione

Hippophae rhamnoides oil, Hyaluronic acid, Glycyrrhetic acid, Aloe barbadensis leaf juice, Glycogen, Water, Propylene glycol, C12-15 alkyl benzoate, PEG-40 hydrogenated castor oil, Glyceryl stearate, Carbomer, Decylene glycol, Tochopherol, Xanthan gum, Hydroxiacetophenone, Polycarbophil, Lactic acid, Sodium hydroxide, Disodium EDTA.

MECLON IDRA non contiene ingredienti di origine animale, profumo, parabeni e alcool.

Ulteriori informazioni

MECLON IDRA è disponibile in confezione da 7 monodose da 5 ml ciascuno. Conservare il presente foglietto illustrativo per avere sempre a disposizione tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo del dispositivo medico.


Controindicazioni

Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità ad uno dei suoi componenti.

INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DOPO L'USO

MATERIALE	CODICE	RACCOLTA
Astuccio	PAP 21	Carta
Foglietto illustrativo	PAP 22	Carta
Incarto	C/PAP 84	Indifferenziata
Tubo monodose	LDPE 4	Plastica

Verifica le disposizioni del tuo comune

 : Biofarma
Via Castelliere, 2 - 33036 Mereto di Tomba (UD) - Italy

 0425











Distributore esclusivo:

Alfasigma S.p.A.

Via Ragazzi del '99 n. 5 - 40133 Bologna (BO)

Data ultima revisione: 03/2023

Legenda simboli:

	NUMERO DI LOTTO Indica il numero di lotto definito dal Fabbricante, in modo che il lotto possa essere identificato
	CODICE IDENTIFICATIVO Indica il codice identificativo definito dal Fabbricante, in modo che il dispositivo medico possa essere identificato
	SCADENZA Indica la data dopo la quale il dispositivo medico non può più essere utilizzato
	Proteggere dai raggi solari
	Proteggere dall'umidità
	Marchio di conformità CE
 25°C	Indica la temperatura massima di conservazione
	Indica la necessità di consultare le istruzioni d'uso
	Indica il nome e l'indirizzo del Fabbricante del dispositivo medico
	Utilizzare il prodotto una sola volta

ALFASIGMA 

45002097
IFU1_11/22r0_11/22